



הוראות שימוש

SilVet[®] היא תמיסת בופר היפרטונית, עם ריח נעים, לחיטוי, שמירת והוספת לחות וטיפול בפצעים. SilVet[®] היא תמיסה צלולה, חסרת צבע, המוגנת מזיהום חיידקי על ידי ריכוז נמוך של יוני כסף. היא מסופקת בבקבוקים של 100 מ"ל, 250 מ"ל ו 500 מ"ל.

שימוש יעודי והתוויות לשימוש:

SilVet[®] מיועדת לשימוש בבעלי חיים וחיות מחמד, על ידי או בהנחיית וטרינר, לשם חיטוי, טיפול, לחלוח והאצת ההחלמה של פצעים, כיבים שונים, פצעים לאחר ניתוח, כוויות מדרגה ראשונה ושנייה, חתכים, שריטות וגירוי עור קלים.

הוראות שימוש כלליות:

SilVet[®] מיועדת לטיפול ולחלוח פצעים וכוויות על ידי מזיגה של תמיסת SilVet[®] ישירות מהבקבוק, באמצעות מזרק פלסטי או במזרק כדור גומי, התזה על הפצע בעזרת בקבוק ספריי, השמה עם התקן המיועד לאפשר שטיפה או על ידי מזיגה על גזה / תחבושת או ספוג. שטוף את הפצע עם SilVet[®] ונקה בעזרת גזה. הספג גזה יבשה בתמיסת ה SilVet[®] וחבוש איתה את הפצע. ניתן לכסות בתחבושת חצי אטימה למניעת התנדפות התמיסה. חזור על ההליך בתדירות של פעם ביום ועד לפעם ב 7 ימים, לפי הוראת הוטרינר. תמיסת SilVet[®] אידיאלית לטיפול ביתי בפצעים ומהווה חלק אינטגרלי בערכת עזרה ראשונה, לטיפול בחיות מחמד ובעלי חיים אחרים. ניתן להשתמש בעד 10 מ"ל של תמיסת SilVet[®] לכל ק"ג משקל גוף בתוך 24 שעות.

אזהרות והתראות:

- לשימוש חיצוני בלבד. המנע ממגע עם העיניים.
- השתמש/י רק בבקבוק שלא ניזוק.
- הפסק/י השימוש אם מתפתח גירוי.
- הימנע/י משימוש בתמיסה עכורה או בעלת צבע.
- הגן/י על הבקבוק ממגע ישיר עם הפצע. בקבוקים שבאו במגע ישיר עם הפצע יש להשמיד לאחר השימוש.
- ניתן להשתמש שימוש חוזר בתמיסה תוך 28 ימים מפתיחת הבקבוק לראשונה, אם הבקבוק נסגר מיד לאחר השימוש.
- אחסן את התמיסה בטמפ' בין 4-40 מעלות צלזיוס.
- בקבוק ריק ניתן לזרוק לפח האשפה. בקבוק שמכיל תמיסה חייב להיות מסולק לאתר המתאים.

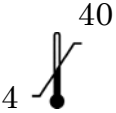
מרכיבים:

מים מטהרים, גליצרול (גליצרין), סורביטן מונולאורט (טווין 20), טריס, מנתול וכסף ניטרטי (w/v) 0.01%

כל אריזה מכילה שניים עשר (12) בקבוקים של 500 מ"ל או 250 מ"ל, או עשרים וארבעה (24) בקבוקים של 100 מ"ל ועלון הוראות שימוש המהווה חלק מתווית הבקבוק.

סמלים:

להלן תיאור הסמלים הגרפיים המופיעים על תיבת SilVet®:

זהירות	
היעזרי/ בהוראות השימוש	
יצרן	
שמורי את הבקבוקים הרחק מאור שמש ישיר	
מגבלת טמפרטורה	
השתמשי/ לפני תאריך	
מעוקר על ידי שימוש בטכנולוגית מילוי אספטי	
אין לעקר שנית	
קוד אצווה/ מס' סחורה	

משרדי הנהלה ראשית

אנזיסרג' בע"מ

רחוב שבזי 26

ראש העין 4802126

טלפון: 03 622 7600

פקס: 03 622 7601

www.enzysurge.com